


エアーショットDX

マニュアル


ご使用前に本マニュアルをお読みください

有限会社ワイズパートナー

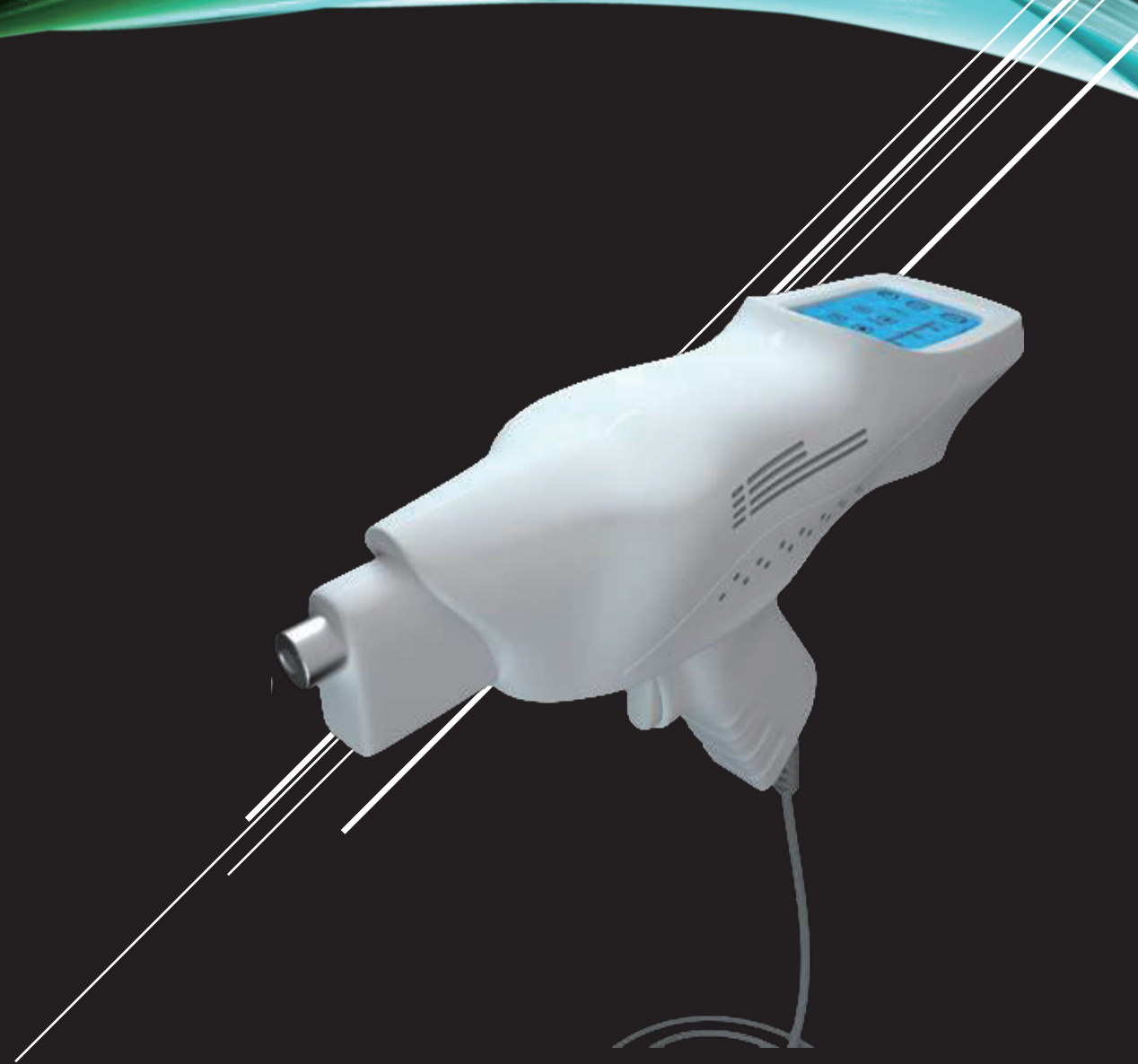

エアーショットDXの技術原理

- 日本・台湾・韓国・欧米など一流の技術が結集した新世代の製品です。
- 特殊な素材と磁 力 を使用して皮膚に均一塗布でき導入することができます
- 約 0.2 秒の新世代の AUTO モデルは、より安全・高速・非侵襲的（生体を傷つけない）で効果的です。
- 美と肌の若返りの5つの技術原理の組み合わせを採用。
- AUTOタイプのアトマイザーにより、瞬時に肌に導入されます。
- コラーゲン細胞を活性化することによってしわ・リフトアップ・および引き締めが期待できます。

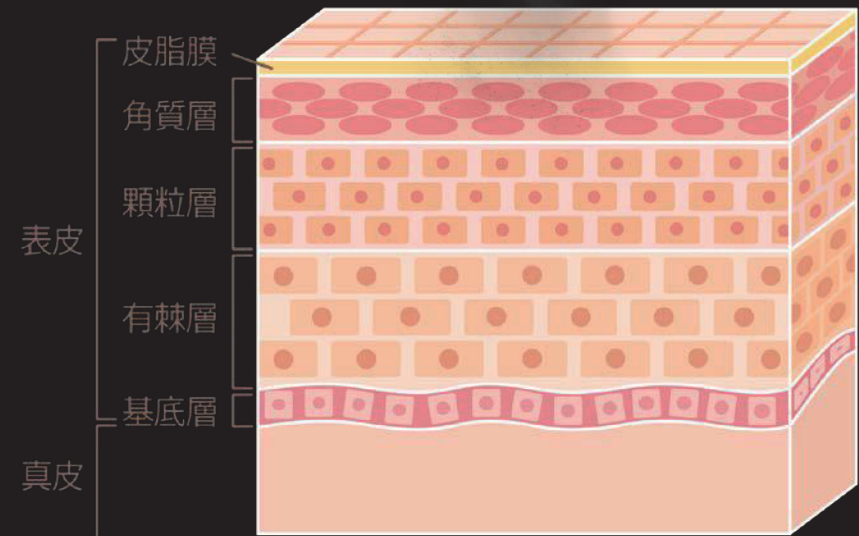


エアージェットDXの5つの主要技術原理


- ✓ 深部伝導
- ✓ 皮膚再生
- ✓ 細胞亀裂
- ✓ マイクロセル覚醒
- ✓ 皮膚の「中胚葉」に医薬品を注入するメソセラピー

しわの除去、フェイスリフト、セルライトの減少、皮膚の引き締めの実現します。

Before : 肌が乾燥・シワ

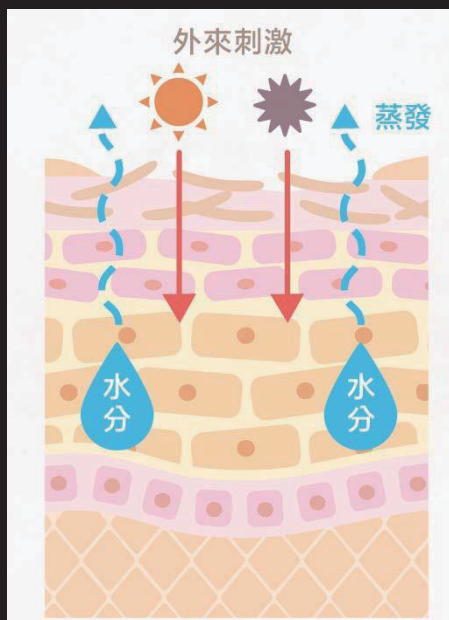

After : 肌のキメが整う

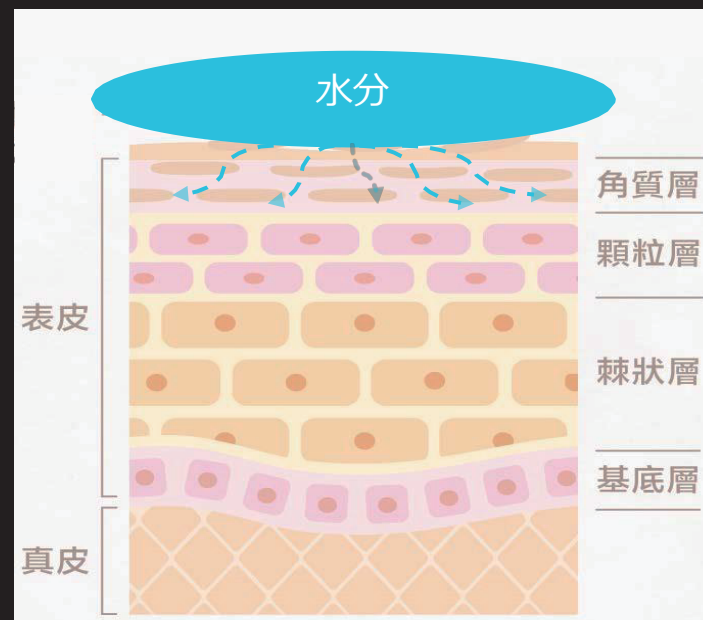

エアージェットDXの特徴

肌を整える


肌のキメを整える

肌を引き締める


皮膚に潤いを与える

エアショットDXの操作方法


1. 機器が電源に接続されていることを確認し、スイッチをオンにすると、LED画面が点灯し、正常に起動します。
(エンター) を押すと図Bが表示されます (Face、Body、Notice、Reset)
(Notice) を押すと 図Cが表示されます。

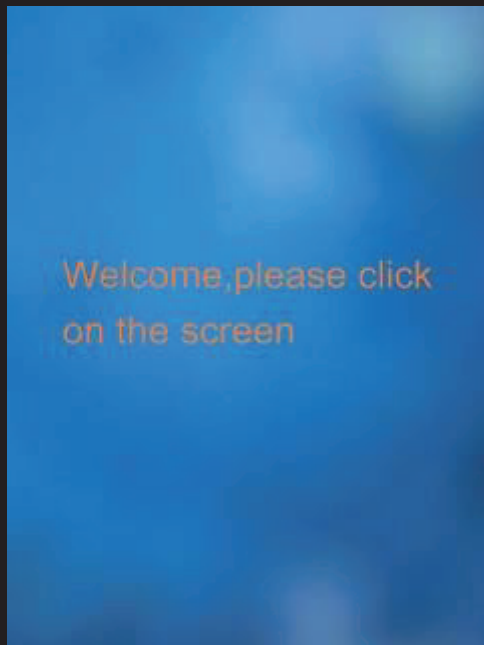

図A

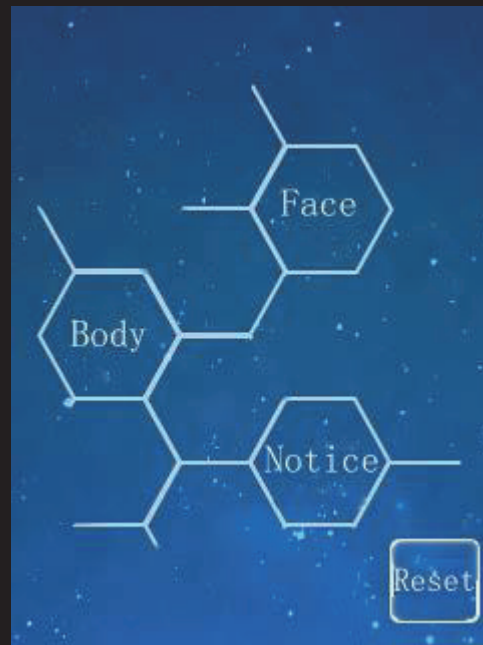


図B

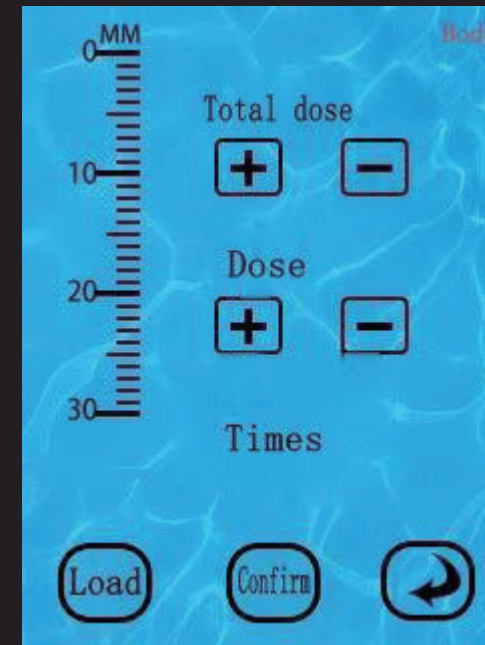


図C

2. 図Bで「Face」を選択してください。画像Dが表示されたら、「Total dose」の下「+」を押し、「Load」を押すと、ガンが徐々に表示されます。次に、アンプルボトルから「0-35」mm 製品を抽出し、ガンに固定します。「投与量」の下「+」を押して（「0.1」は左側の1つの目盛りを示します）、「Confirm」を押して操作を開始します。体の部位を治療するには図Bで「body」を押してください。警告サインが表示された場合は、「reset」を押してください。マシンが再起動します。

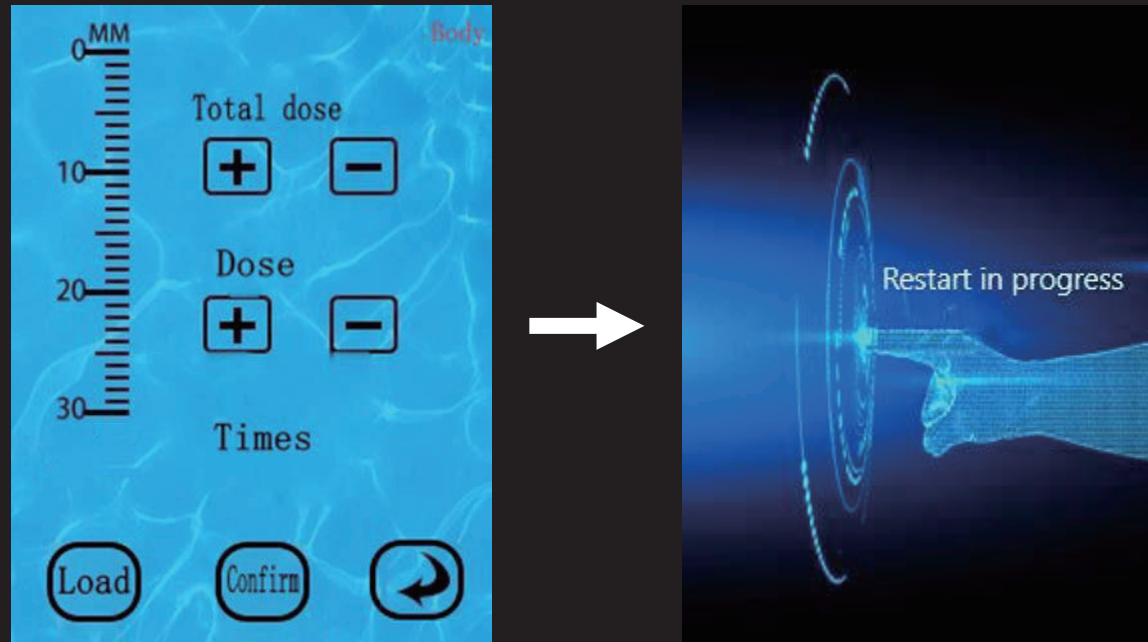

図D

操作設定

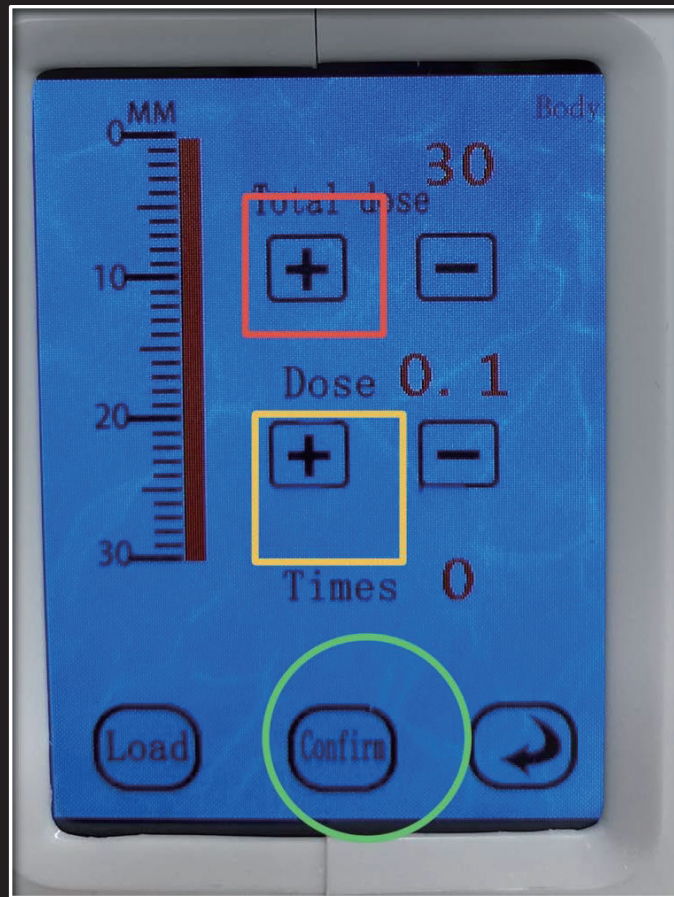

赤：先端に取り付けるカードリッジの分量に合わせてショット数をセットする。

(0,3mlで30ショット)


黄：1回のショット分量をセットします。

(0,1で1回分量が0,01ml)


緑：スタートボタンです。

(このボタンを1回押してください)

連続して使用する場合の操作方法

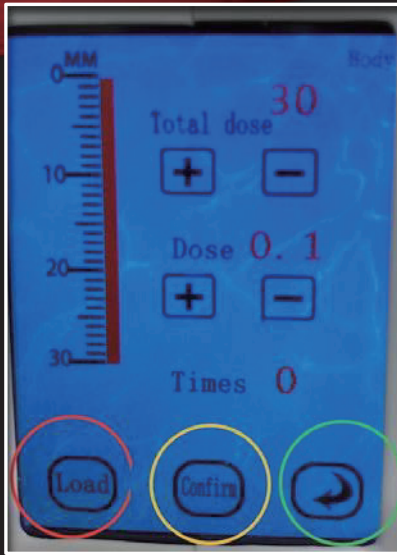

- ① 30ショット終わり2本目、3本目と連続して使用する際は、ショット終わりましたら
赤→黄→緑 の順番で押し設定画面に戻ります。

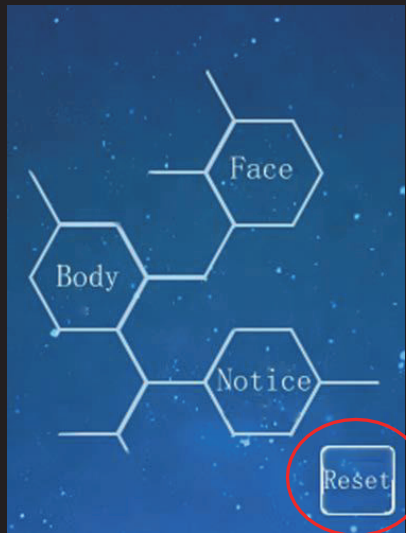


- ②画面右下のResetボタンを1回タッチして戻ってください。
- ③再度、操作設定しそのまま続けてください。


誤作動による先端が戻らない場合のリセット方法



使用后、この様に中に納まらなくなった場合

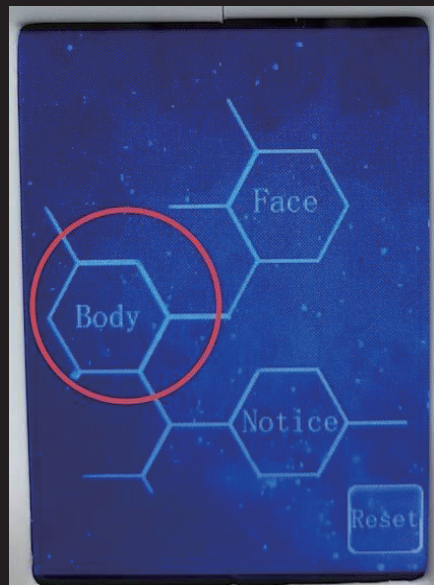


①bodyを1回タッチ

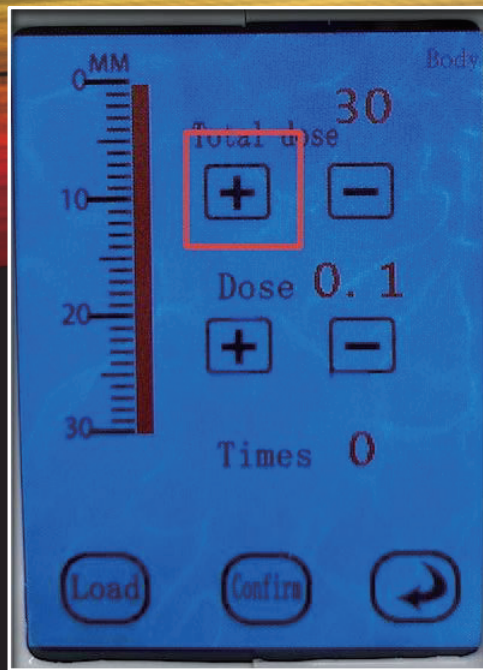

②+を押し30ショットにし
LOADを押す




④先端が止まるのを待つ

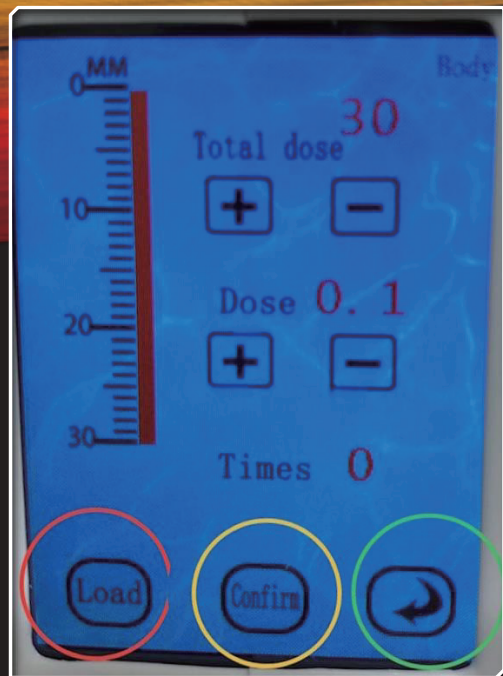

④赤→黄→緑

の順番で押す

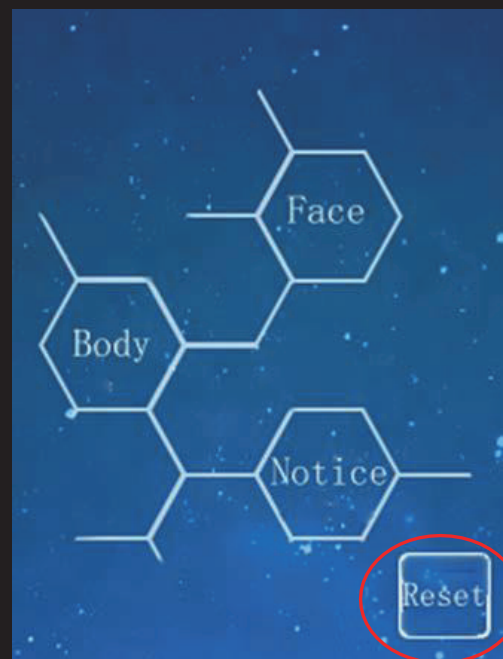

⑤セット画面に戻ります

Resetボタンを3秒程長押しすると
自動で先端が動き始め本体の中に全て入ります。

これでリセット完了です。

エアークワイエットDXのスペック

▶ 環境要件 :

1. 周囲温度: $-5^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ /
2. 相対湿度: 20% ~ 90% (結露なきこと)

▶ 電源仕様 (AC 入力) :

110V 50 ~ 60Hz / 220V 50 ~ 60Hz

▶ 電源表示:

1. スタンバイ電力 : 10W
2. 最大電力 : 300W

エアージェットDX使用注意事項

1. 操作後は、操作部分を手で絞らないでください。体格の異なる人にとって、スプレー後のパフォーマンスは異なります。
2. 使用後2日程度は化粧をしない、日焼けに注意する、温泉に浸からない、運動をしない、マスクをする。
3. 使用後の初期傷部位は使用禁止です。歯に金属が入っている人は使用禁止です。
4. 手術を受けていたり、深い剥離から回復していない人は使用できません。放射線治療を受けている人は施術できません。
5. お手入れ後は、軟膏、スキンケア製品、化粧品を使用しないでください。
6. 未成年の方のご利用はご遠慮ください。

エアーショットDX使用注意事項

1. 使い捨てのアタッチメントですので、一度使用すると使用できなくなります。新しくアタッチメントご使用ください。
2. 手順に従って使用する必要があります。連続使用すると、機器が熱くなる可能性があり、熱は自動的に冷却されます。一定の加が加えると、動作を停止しますので、冷えるまでお待ちください。使用。
3. 30分間使用後、5分間冷ましてから使用してください。

保証

1. 保証: 本体は1年、ハンドピースは3か月の保証になります。以降は有償修理。
2. 保証期間内であっても、以下の場合には有償修理となりますのでご注意ください。 A. 不適切な使用による故障; B. 人為的な故障;など (タッチ、落下など)
3. 製品の不適切な改造または破壊に起因する故障。*マニュアルに従って使用してください。